




Linterna de Diagnóstico LED

Manual de Usuario

Código: GMD401-PL48

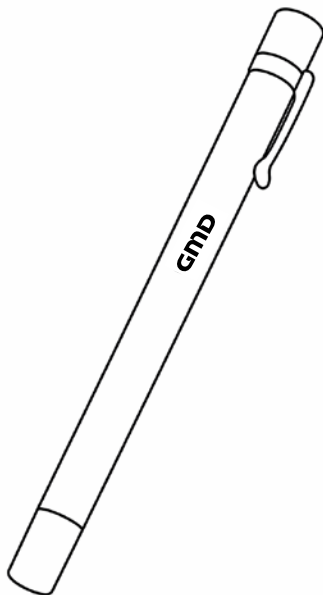

¡Gracias por elegir GMD!

Para un uso adecuado de este producto y garantizar su precisión y vida útil, por favor lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Índice

Descripción del producto	4
Uso previsto	4
Indicaciones de uso.....	4
Contraindicaciones.....	4
Advertencias y precauciones	5
Especificaciones técnicas	5
Instalación de baterías.....	6
Instrucciones de uso	7
Limpieza y mantenimiento.....	7
Almacenamiento.....	7
Garantía.....	7

Descripción del producto

La Linterna de Diagnóstico GMD401-PL48 es un dispositivo portátil diseñado para apoyar la evaluación visual durante procedimientos de examinación clínica, especialmente en la exploración de ojos, cavidad oral y otras evaluaciones básicas.

Está fabricada con cuerpo de aluminio liviano y resistente, e incorpora luz LED de larga duración, lo que proporciona una iluminación clara y uniforme para facilitar la observación durante el examen. Su sistema de encendido y apagado por contacto permite una operación rápida y sencilla.

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por estudiantes y profesionales de la salud en entornos clínicos o educativos.

Uso previsto

La linterna de diagnóstico está destinada a proporcionar iluminación focalizada durante la evaluación clínica, facilitando la observación de estructuras anatómicas como pupilas, cavidad oral, garganta y otras áreas externas del cuerpo durante procedimientos de examinación física.

Indicaciones de uso

Cuando no uses la protección ocular, te recomendamos que la guardes en una bolsa limpia o en una caja de gafas limpia y seca.

Instrucciones de uso

- Este dispositivo puede utilizarse para:
- Evaluación del reflejo pupilar durante examinación ocular.
- Iluminación durante la inspección de cavidad oral y garganta.
- Apoyo en exámenes físicos generales que requieran iluminación focal.
- Uso en consultorios médicos, hospitales, clínicas, instituciones educativas y entornos de formación en salud.

Contraindicaciones

- No utilizar el dispositivo directamente sobre los ojos durante períodos prolongados.

- No utilizar el dispositivo en presencia de gases inflamables o ambientes explosivos.
- No usar el producto si presenta daños visibles o mal funcionamiento.

Advertencias y precauciones

- Este dispositivo debe ser utilizado únicamente por personal capacitado o bajo supervisión de un profesional de la salud.
- No dirigir la luz directamente hacia los ojos por tiempo prolongado para evitar molestias o deslumbramiento.
- Mantener el dispositivo fuera del alcance de niños cuando no esté en uso.
- No sumergir el dispositivo en agua ni en otros líquidos.
- No intentar desarmar o modificar el dispositivo.
- Utilizar únicamente baterías del tipo recomendado.

Especificaciones técnicas


Característica	Especificación
Fuente de luz	LED
Material	Aluminio
Sistema de encendido	Por contacto
Alimentación	2 baterías AAA
Tensión	3.0 Vdc
Ancho	1.4 cm
Altura	13.5 cm
Peso neto	0.05 kg
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: 5 °C – 55 °C Humedad: 10 % – 90 % RH

Instalación de baterías


1. Desenrosque la parte inferior de la linterna.



2. Inserte dos baterías AAA de 1.5 V respetando la polaridad indicada.

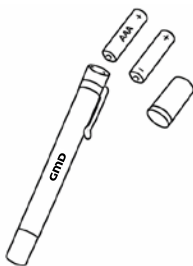

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

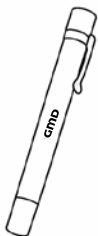

4. Asegúrese de que la linterna esté correctamente cerrada.

Instrucciones de uso

1. Verifique que las baterías estén correctamente instaladas.
2. Sostenga la linterna de manera firme.
3. Active el dispositivo utilizando el sistema de encendido por contacto.
4. Dirija la luz hacia el área que se desea examinar.
5. Una vez finalizado el examen, apague la linterna.

Limpieza y mantenimiento

- Limpie el dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.
- No utilice solventes, alcohol en exceso o productos abrasivos.
- No permita que líquidos ingresen al compartimento de baterías.

Almacenamiento

- Mantener en un lugar limpio y seco.
- Evitar exposición directa al calor extremo o humedad elevada.
- Retirar las baterías si el dispositivo no se utilizará por periodos prolongados.

Garantía

Este producto cuenta con una garantía de un (1) año a partir de la fecha de compra, la cual cubre defectos de fabricación en materiales y ensamblaje bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:


- Defectos en los componentes electrónicos.
- Fallas de funcionamiento atribuibles a defectos de fabricación.


La garantía no cubre:

- Daños ocasionados por golpes, caídas o uso indebido.
- Daños ocasionados por manipulación o reparaciones no autorizadas.
- Daños ocasionados por uso de baterías incorrectas.
- Desgaste normal del producto.



Líneas de atención al cliente

 +57 310 493 6998

 servicioalcliente@impormedical.com.co
