

SILLA PARA DUCHA CON BRAZOS




PARA MAYORES DETALLES
DEL PROCESO DE ENSAMBLE
ESCANEE ESTE CÓDIGO QR



Registro Sanitario: 2018DM-0018624
Nombre Registro: Ayudas sanitarias, partes accesorios y repuestos.

Fabricante: Double Care Medical Technology Co., Ltd.
Dirección del Fabricante: Yongshi Avenue, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China
Importado por: Impormedical Equipos y Suministros Médicos S.A.
Dirección del Importador: Carrera 34C #44-157, Bodega 44, Palmira, Colombia
Teléfono: (2) 285 50 88

SILLA PARA DUCHA CON BRAZOS

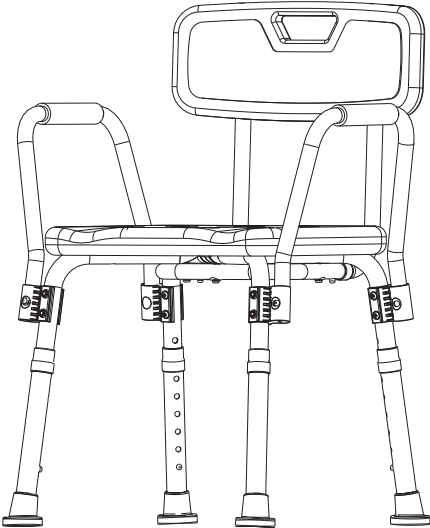


MANUAL DE USUARIO

Estructura Básica


	Reposabrazos x2		Respaldo plástico x1		Tornillos C (40 mm) x4
	Tubos de apoyo del respaldo x2		Asiento plástico x1		Arandelas x9
	Soporte asiento "2" x1		Tornillos D (35 mm) x5		Soporte asiento "1" x1

Instrucciones de Ensamble


⚠ ATENCIÓN: Para el ensamble se requiere un destornillador de estria.

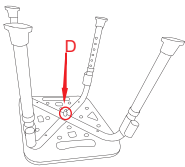


1) Coloque los dos (2) soportes del asiento "1" y "2" sobre el asiento y ajústelo con 1 tornillo "D" con su respectiva arandela.

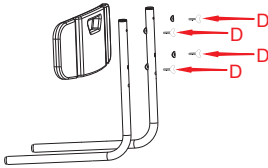

2) Ubique los dos (2) tubos de apoyo del respaldo en la parte trasera, ubique los hoyos alineados y ajústelo con 4 tornillos "D" con sus respectivas arandelas.

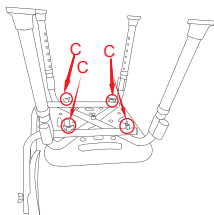

3) Ubique los tubos de apoyo del respaldo sobre los soportes del asiento verificando que los hoyos estén alineados y ajústelo con 4 tornillos "C" con sus respectivas arandelas.

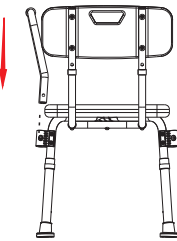

4) Coloque los reposabrazos en su respectivos soportes ubicados en los soportes del asiento, y asegúrelos con sus respectivos pines de seguridad.

⚠ IMPORTANTE

- 1) Por favor no apoye todo el peso corporal hacia un solo lado de la silla para ducha.
- 2) Antes de usar, verifique que las cuatro patas se encuentren a la misma altura y asegúrese de que los pines se vean
- 3) No use la silla para ducha si excede la capacidad máxima de peso (130 kg)



Limpieza y mantenimiento

Utilice un paño suave para la limpieza de la silla para ducha

Condiciones de transporte y almacenamiento

Proteja el producto del sol, la lluvia y proteja el marco.

Vida útil

Tiempo recomendado de uso: Tres (3) años

Política de garantía

Konfort Plus garantiza que este producto cumple con las especificaciones descritas en el manual y está libre de defectos en los materiales y en la fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra del primer usuario. Esta garantía no cubre los daños causados por:

- Uso o mantenimiento del producto distinto a lo especificado en el manual de usuario.
- Modificación o reparación del dispositivo por parte de personal no autorizado por Konfort Plus.
- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a sustancias corrosivas, así como por cualquier otra falla que se atribuya al usuario.
- No están cubiertos por la garantía: tapones, espuma del apoyabrazos o cualquier otra pieza que sea considerada de desgaste.

Si se determina que algún producto o accesorio cubierto por esta garantía es defectuoso debido al uso de materiales, componentes o fabricación, y se reclama la garantía dentro del periodo establecido, Konfort Plus reparará o reemplazará, a su criterio, el producto o accesorio defectuoso sin costo alguno.

Para solicitar servicio técnico o garantía por parte de Konfort Plus, contáctese con servicio al cliente, quien le brindará asesoría y un número de notificación para darle solución a su petición.

Información de contacto:

En caso de requerir información acerca del uso del producto o alguna reclamación referente a las PQRS, por favor contáctese a nuestras líneas de servicio al cliente (2) 285 5088 ext 104 / +57 310 4936998 o al correo electrónico servicioalcliente@impormedical.com.co