




- 11** Conecte la sonda de succión requerido de acuerdo al procedimiento al otro extremo del tubo de succión

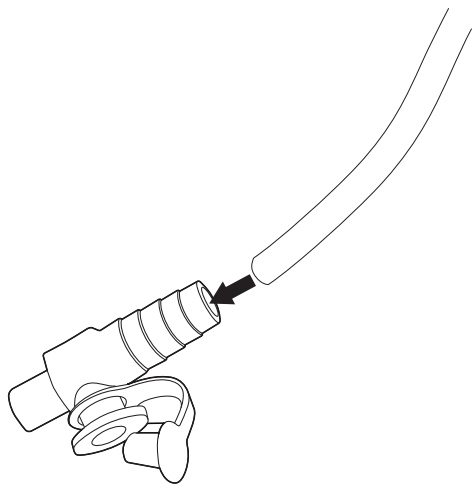


- 13** Gradúe la presión negativa de salida

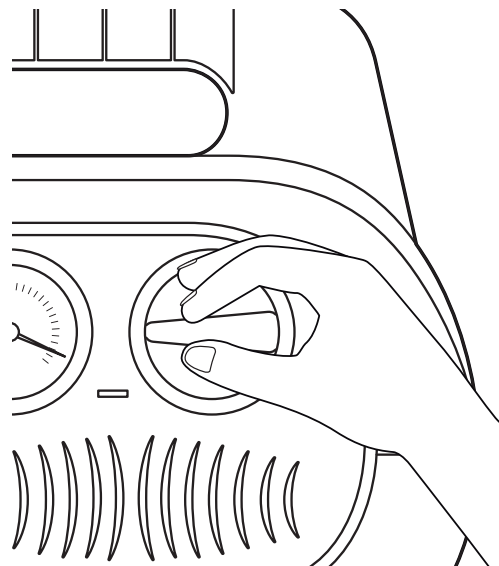


- 15** Presione el botón de la sonda para iniciar la succión

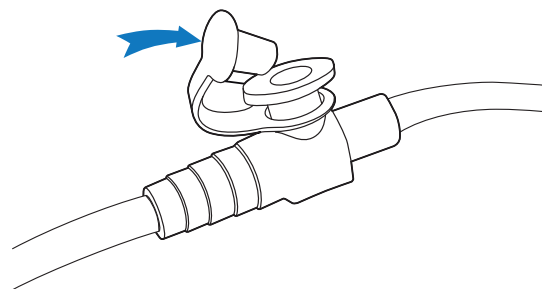

- 12** Presione el botón de inicio

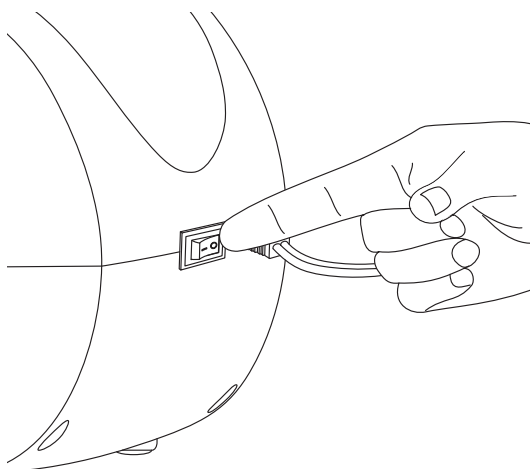


- 14** Introduzca la sonda de succión en la cavidad requerida (nariz, boca o tráquea)

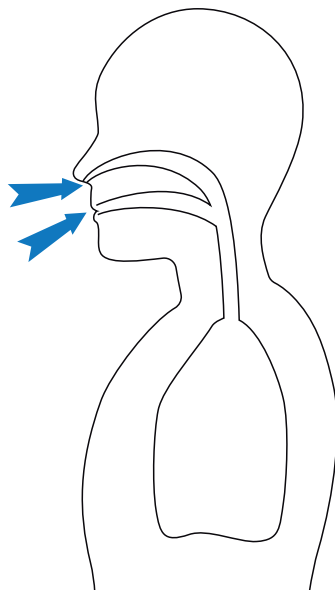


Guía de inicio rápido


- 1** Ubicar el aspirador de secreciones en una superficie plana horizontal

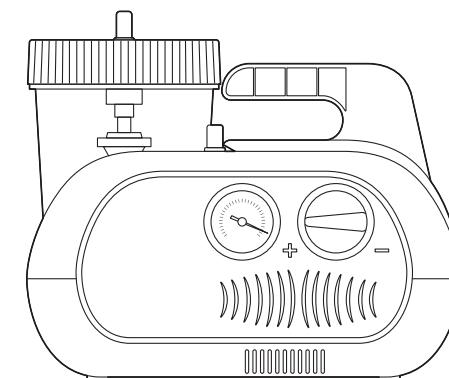


- 2** Conectar el cable de alimentación al tomacorriente

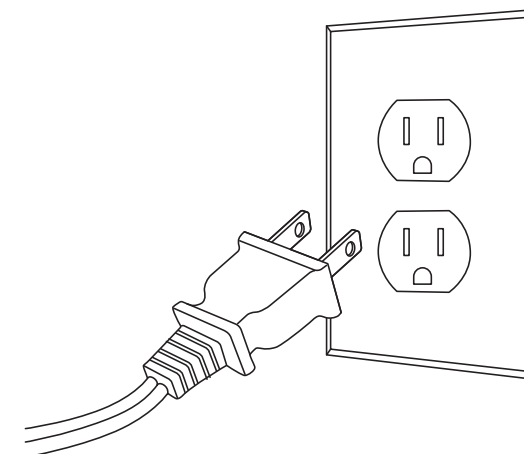


3 Lavar bien las manos

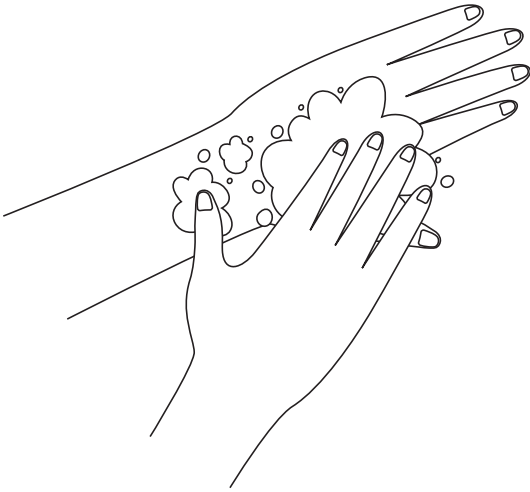


4 Usar guantes estériles

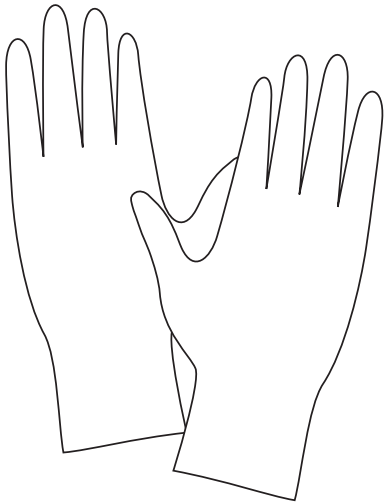


5 Selle el recipiente adecuadamente con su tapa

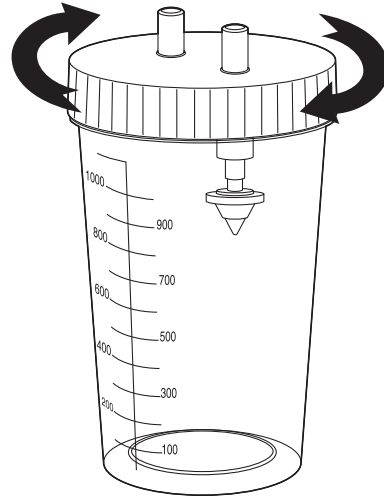


6 Instale el recipiente en el soporte

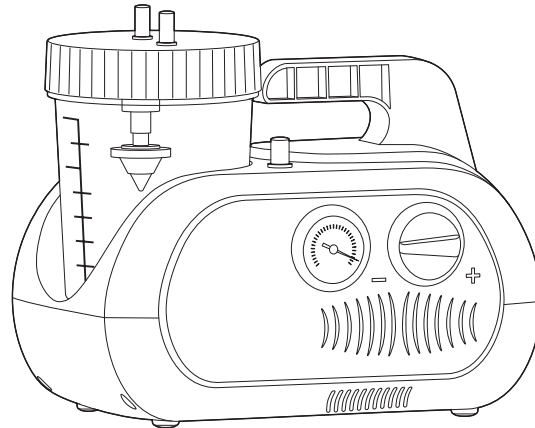


7 Conecte un extremo del tubo intermedio al terminal de salida de aire del recipiente

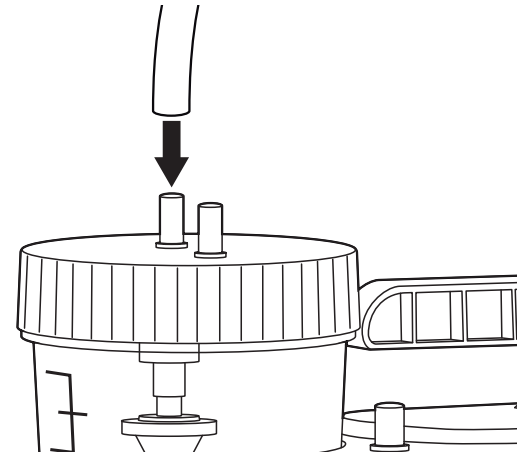

8 Conecte el filtro hidrofóbico al otro extremo del tubo intermedio

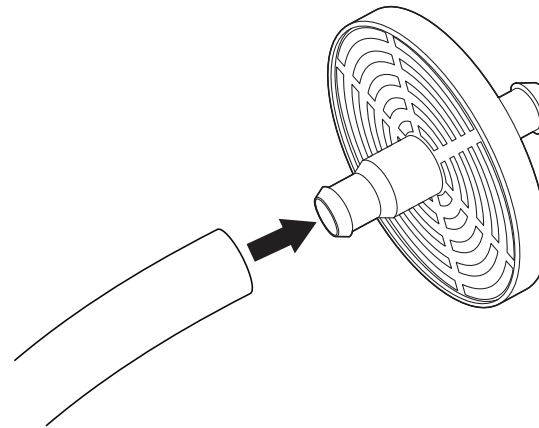

9 Conecte el segundo tubo intermedio entre el filtro y la salida de presión del aspirador

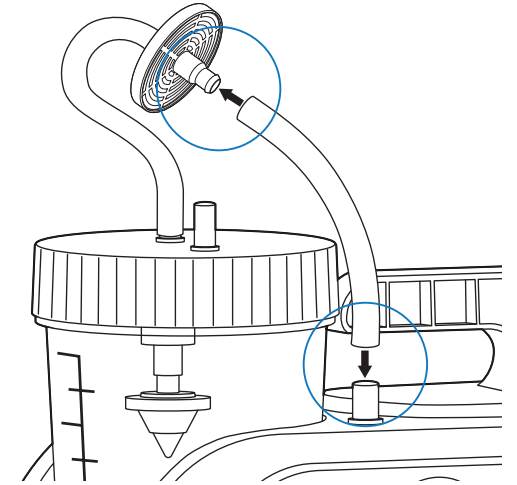

10 Conecte un extremo del tubo de succión al terminal de entrada de secreciones del recipiente

