


BASTÓN DE 4 APOYOS CON LINTERNA

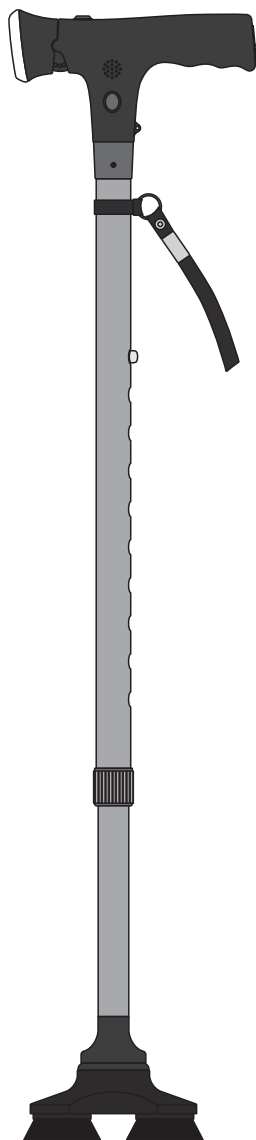

Manual de usuario

FABRICANTE:

Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd.

Dirección: No.1 Xiangji, Dali, Shenzhen Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China

IMPORTADOR:

Impormedical equipos y suministros médicos S.A.

Av 9AN # 7N-111, Cali, Valle, Colombia. Tel: +57 602 285 5088

Número de registro sanitario: INVIMA 2021DM-0023527

Nombre de registro: Ayudas para la movilidad del paciente partes accesorios y repuestos

Tabla de contenido

Información general del producto	5
Uso del bastón	7
¿Cómo caminar?	7
¿Cómo bajar y subir escaleras?	7
Uso de la linterna	8
Activar/desactivar luces	8
Activar/desactivar señal de auxilio	8
Reemplazo de las baterías	9
Limpieza	10
Advertencias, precauciones y contraindicaciones	10
Garantía	11

GRACIAS

Por seleccionar el **Bastón de 4 apoyos con linterna de Konfort Plus**, por favor conserve y lea cuidadosamente este manual y siga las instrucciones para un uso seguro de este producto.

Por favor complete la siguiente información para futuras referencias en caso de tener algún inconveniente:

Fecha de compra: _____

Número de lote: _____

*Registre su producto en **www.konfortplus.com.co** (hasta máximo 15 días después de la fecha de la compra), para obtener **un (1) año de garantía** adicional.*

Información general del producto

Especificaciones técnicas:


Material estructura:	Aluminio
Peso neto:	430 g
Capacidad de peso:	Hasta 110 kg
Altura bastón:	[76-98] cm
Material empuñadura	ABS

¿Qué tipo de ayuda brinda?


Los bastones de cuatro (4) apoyos son ideales para personas con alteraciones en el equilibrio y fuerza, ya que ofrecen estabilidad y mayor contacto con el suelo, evitando así la posibilidad de deslizamientos y de caídas.

¿Cómo ajustar la medida correcta?


Para el ajuste de la altura, manteniendo los brazos a un lado con la curva de codo en un ángulo de aproximadamente 20 grados, mida desde el suelo hasta la muñeca (**M**).

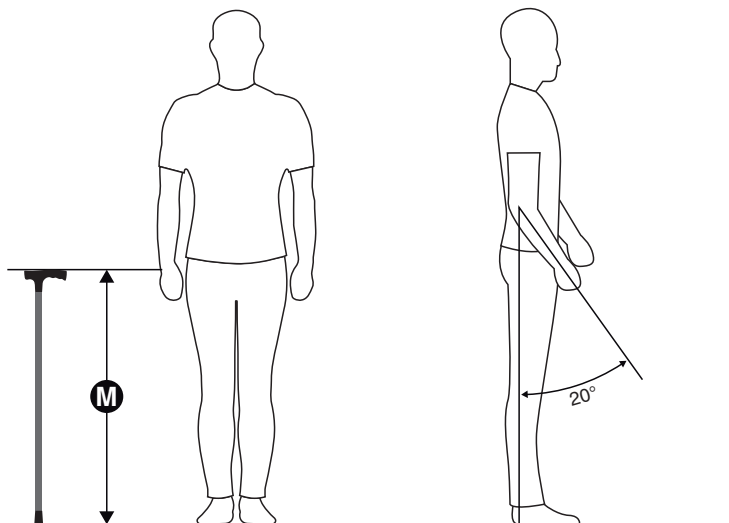


1. Afloje la rosca de seguridad, girándola en el sentido de las manecillas del reloj

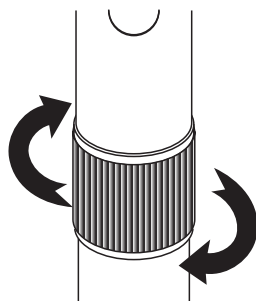

2. Oprima el pin de seguridad y tire hacia arriba de la empuñadura para alargar, o empuje hacia abajo de la empuñadura para acortarlo.

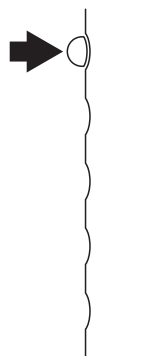

3. Luego de ajustar a la altura deseada, apriete nuevamente la rosca de seguridad girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

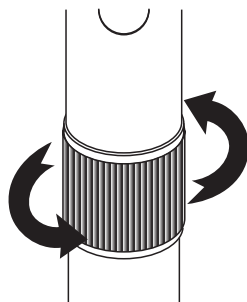


Uso del bastón


Sostenga el bastón en la mano opuesta a la pierna afectada, esto le brindará mayor soporte al caminar.

¿Cómo caminar?

Debe mover sus brazos y piernas de manera alternada, así: el brazo que sostiene el bastón y la pierna afectada deben moverse hacia adelante al mismo tiempo, así como lo haría al caminar sin ninguna ayuda. De esta manera logra que el peso se distribuya entre la pierna afectada y el bastón.

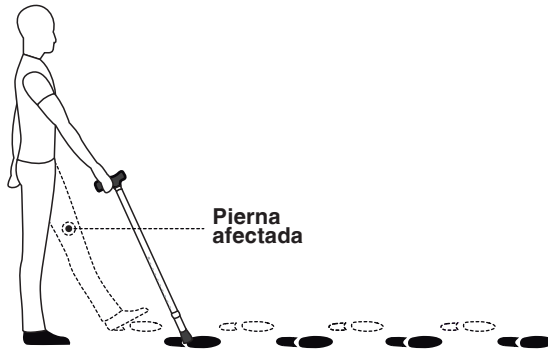

¿Cómo subir y bajar escaleras?

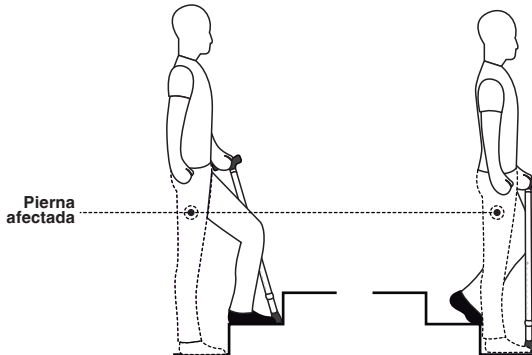

Subir escaleras


1. Subir pierna sana al escalón de arriba.
2. Subir bastón.
3. Subir pierna afectada.

Bajar escaleras

1. Bajar el bastón al escalón.
2. Bajar pierna afectada.
3. Bajar pierna sana.

NOTA: Apóyese de una baranda, en tanto le sea posible

Uso de la linterna

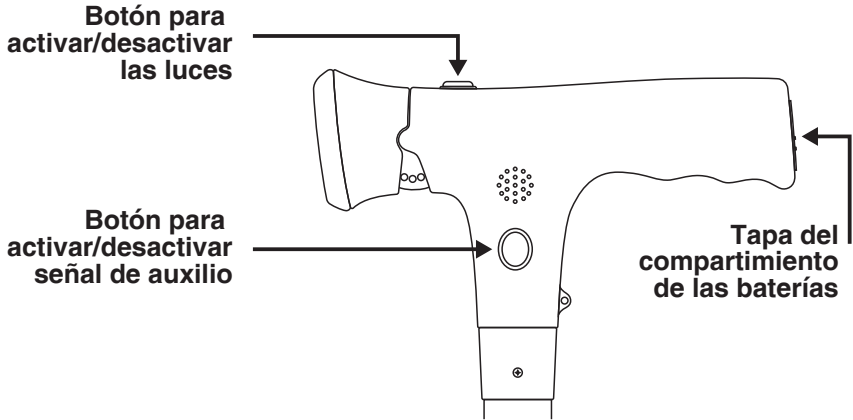


Activar/desactivar las luces

Para activar la linterna y la luz roja, oprima el botón ubicado en la parte superior, así:

- Presione el botón una (1) vez para activar la luz de la linterna
- Presione nuevamente el botón para activar la luz roja en la empuñadura
- Presione nuevamente el botón para apagar las luces.

NOTA: La luz delantera se puede rotar en 4 posiciones, para dirigir la luz donde la necesite.

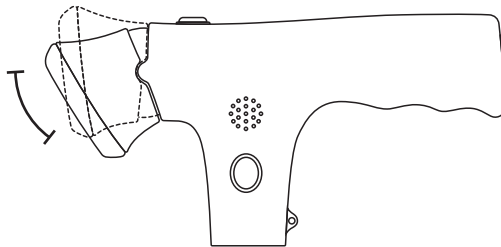


Activar/desactivar la señal de Auxilio


Para activar la señal de auxilio, presione el botón ubicado en el costado de la empuñadura, la luz roja en la base parpadeará y la empuñadura emitirá un sonido de alarma.

Reemplazo de las baterías

Para el funcionamiento de las luces y señal de auxilio, el bastón requiere dos (2) baterías AAA*; las cuales deben ser reemplazadas cuando sea necesario. Para ello abra el compartimiento de las baterías ubicado en la parte posterior del mango, deslizando hacia arriba el seguro de la tapa. Retire las baterías agotadas y deséchelas correctamente.

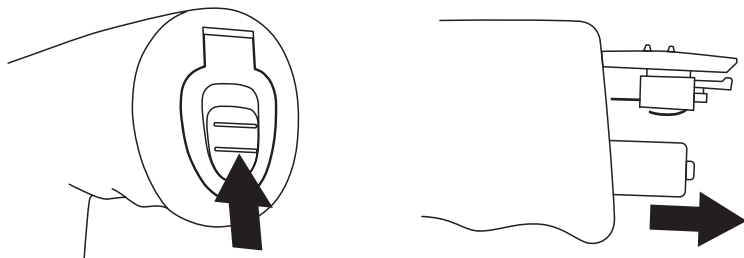

Luego inserte las dos (2) nuevas baterías AAA, con la polaridad correcta (con el polo positivo (+) hacia el exterior donde se encuentra el resorte). Por último cierre la tapa del compartimiento de las baterías, deslizando hacia abajo el seguro de la tapa del compartimiento.

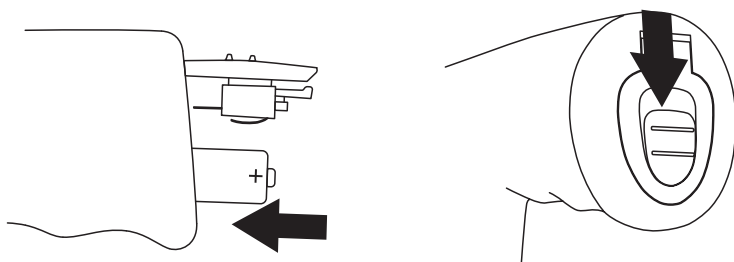

(*) Las baterías AAA no están incluidas.

Limpieza

Limpie el producto con jabones o limpiadores no abrasivos. No utilice solventes orgánicos (acetonas, MEK, líquido encendedor, líquido para lavado en seco, gasolina o trementina) que puedan disolver el plástico y provocar que la empuñadura se debilite.

Advertencias, precauciones y contraindicaciones

Consulte con un profesional de la salud, si tiene permitido descargar peso sobre sus piernas. Deberá cerciorarse que:

- La ayuda técnica sea ajustada a la altura correcta.
- El pin de seguridad esté totalmente asegurado y la rosca de seguridad esté firme.
- Las gomas de los apoyos de la base se encuentren en óptima condición.
- Si las gomas de los apoyos de la base presentan algún tipo de desgaste se recomienda reemplazarlas inmediatamente.
- La empuñadura esté asegurada.
- Su peso no exceda 110 kg.
- No debe ser usado por personas con alergia al látex.
- No utilice juntas baterías nuevas y usadas. No combine baterías alcalinas, estándar (Carbono-Zinc) o recargables (NiCd).

Precauciones

- Evite todos los peligros potenciales de seguridad incluyendo las superficies lisas, desniveladas, inestables y los obstáculos en el camino.
- Use únicamente los accesorios **Konfort Plus**. El uso de cualquier otra clase de accesorios podría resultar en una adaptación inapropiada, quedando expuesto al riesgo de sufrir una caída y lesionarse.
- El uso de ayudas técnicas en regaderas, tinas, albercas, etcétera, puede dañar la ayuda.
- No use la ayuda técnica si se encuentra tomando medicamentos que puedan afectar o interferir con el uso seguro de este producto.
- El no seguir las instrucciones mencionadas anteriormente puede resultar en lesiones graves.

Garantía

Konfort Plus garantiza que el producto **Bastón de 4 apoyos con linterna** cumple con las especificaciones descritas en el manual, y está libre de defectos en los materiales y en la fabricación durante dos (2) años a partir de la fecha de compra del primer usuario. Si se realiza el registro del producto en la página web **www.konfortplus.com.co** quince (15) días después de la fecha de factura, obtendrá un (1) año de garantía adicional.

Esta garantía no cubre los daños causados por:

1. Uso o mantenimiento del producto distinto a lo especificado en el manual de usuario.
2. Modificación o reparación del dispositivo por parte de personal no autorizado por **Konfort Plus**.
3. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a humedad, mojado por algún líquido o sustancia corrosiva, así como por cualquier otra falla que se atribuya al usuario.
4. No están cubiertos por la garantía: la empuñadura y sus componentes eléctricos, base o cualquier otra parte que puedan sufrir desgaste por uso regular.

Nota: Si se determina que algún producto o accesorio cubierto por esta garantía es defectuoso debido al uso de materiales, componentes o fabricación, y se reclama la garantía dentro del período establecido, **Konfort Plus** reparará o reemplazará, a su criterio, el producto o accesorio defectuoso sin costo alguno.

Para solicitar servicio técnico o garantía por parte de **Konfort Plus**, contáctese con servicio al cliente, quien le brindará asesoría y un número de notificación para darle solución a su petición.

Servicio al cliente

En caso de requerir información acerca del uso del producto o alguna reclamación referente a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS), por favor contáctese a nuestras líneas de servicio al cliente: **602 285 5088 ext. 104 / 310 493 6998** o al correo electrónico **servicioalcliente@impormedical.com.co**



www.konfortplus.com.co