




---

# Cura Adhesiva Impermeable

---

## Manual de Usuario

Modelo: FSTQ

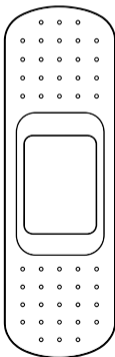

## ¡Gracias por elegir GMD!

Para un uso adecuado de este producto y garantizar su precisión y vida útil, por favor lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

### Descripción

Un vendaje en forma de lámina o rollo generalmente compuesto por un sustrato recubierto de goma, una almohadilla absorbente, una capa antiadherente y una capa protectora removible. La almohadilla absorbente generalmente está hecha de un material que puede absorber el exudado. Los ingredientes no tienen efectos farmacológicos. Los ingredientes no pueden ser absorbidos por el cuerpo humano. No estéril y se proporciona para un solo uso. Características

### Uso previsto

Para primeros auxilios y vendajes temporales de heridas superficiales como pequeñas heridas, abrasiones, cortes, etc.

### Instrucción de uso

1. Antes de usar este producto, limpie o desinfecte primero la herida.
2. Abra el paquete y saque el producto, retire el papel de cobertura y pegue la cinta sobre la piel verificando que el pad de absorción quede sobre la herida.
3. Presione los bordes hacia abajo para asegurarse de que la cura esté firmemente en su lugar.

4. Para mantener la herida limpia, cambie la cura cada 12 horas o cada día y utilícelas hasta que la herida se cure.

### Precauciones y advertencias

1. Verifique si el empaque está completo antes de usarlo y verifique la etiqueta, la fecha de producción y la fecha de vencimiento. Utilícelo dentro del período de validez.
2. No lo use si está almacenado incorrectamente, descolorido, mohoso o si el embalaje está dañado.
3. Este producto es un producto de un solo uso y no se puede reutilizar.
4. Después de su uso, los desechos deben eliminarse de acuerdo con los requisitos del hospital o de acuerdo con las normas locales.
5. Si hay molestias o enrojecimiento ocasional de la piel durante el uso, desaparecerá después de su uso.
6. Este producto es un parche externo, por favor no lo ingiera por error.
7. Los niños deben usarlo bajo la supervisión de sus padres.

### Contraindicaciones

Persona con hipersensibilidad a los adhesivos acrílicos.

### Condiciones de almacenamiento

Este producto debe almacenarse en un ambiente limpio, seca, sin incidencia directa de luz solar y bien ventilado, sin gases corrosivos.

### Condiciones de transporte

Durante el transporte, este producto debe protegerse de fuertes presiones, luz solar directa, lluvia y temperaturas extremas.

### Embalaje

Este producto se envasa individualmente.

### Advertencia

En las siguientes situaciones, busque atención médica de inmediato y el personal médico profesional debe estar involucrado, no se limite únicamente al uso de una cura.



Mordedura de animal, Trauma profundo, Quemaduras de alta temperatura, Herida de más de 1 cm.



---

**Líneas de atención al cliente**



+57 310 493 6998



servicioalcliente@impormedical.com.co

---