



MANUAL DE USUARIO

KIT DENTAL

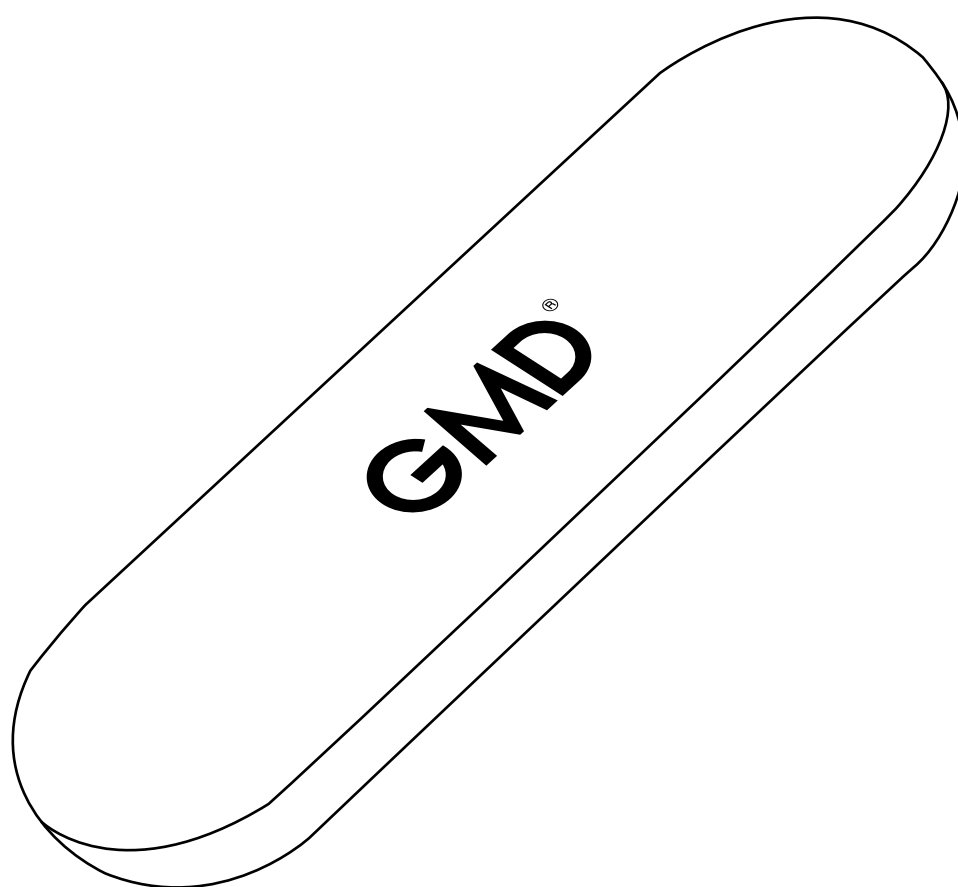


REF: GMD-KD-259

CONTENIDO:

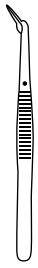

La **pinza dental** se utiliza normalmente para manipular objetos y materiales pequeños durante los procedimientos dentales. En un kit dental, se pueden utilizar para tareas como sostener rollos de algodón, colocar pequeños instrumentos dentales o manipular materiales como gasas.

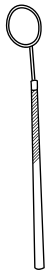

El **espejo bucal** es una herramienta vital en los exámenes bucales. Se utiliza para ver e inspeccionar todas las áreas de la cavidad bucal, incluidos los dientes, las encías y otras estructuras bucales. El espejo ayuda a visualizar áreas que no son fácilmente visibles directamente, lo que facilita el diagnóstico de problemas dentales.



El **limpiador de encías**, también conocido como estimulador de encías o estimulador con punta de goma, para masajear y estimular las encías. Puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea en las encías, eliminar los residuos entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías y promover la salud de las encías.



Un **raspador de sarro**, también llamado removedor de cálculo se utiliza para eliminar el sarro (placa endurecida) de las superficies de los dientes. Los profesionales dentales utilizan este instrumento durante las limpiezas dentales para eliminar la acumulación de cálculo, que puede contribuir a la enfermedad de las encías y las caries si no se trata.



El **raspador de hoz**, es otro tipo de instrumento dental que se utiliza para eliminar el cálculo y la placa de los dientes. Tiene una punta puntiaguda que puede acceder a espacios reducidos entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.



Advertencias

- Nunca haga mal uso de los instrumentos ni los fuerce demasiado.
- Nunca utilice elementos abrasivos en los instrumentos, ya que esto puede afectar el acabado de la superficie. Posteriormente, esto puede provocar decoloración, oxidación o fracturas.
- Nunca manipule los instrumentos por sus puntas. Estos deben ser limpiados únicamente por personal capacitado, quien se asegurará de que los delicados extremos de trabajo estén adecuadamente protegidos durante el almacenamiento o la esterilización.
- Nunca empaque instrumentos con otros instrumentos más pesados. Recuerde siempre los instrumentos pesados abajo y los ligeros arriba.
- Nunca use aceite de uso general para instrumentos, solo se deben usar lubricantes solubles en agua.
- Nunca deje los instrumentos en remojo en soluciones químicas esterilizantes más tiempo del necesario. Una vez esterilizados, se deben lavar minuciosamente con agua tibia para eliminar todos los restos del químico y evitar la decoloración o deformaciones.
- Nunca guarde instrumentos húmedos; primero deben secarse completamente.



Instrucciones

- Consulte siempre todas las instrucciones de uso y esterilización de instrumentos nuevos. A menos que se indique lo contrario, deben inspeccionarse, limpiarse, enjuagarse y lubricarse antes de ponerse en servicio.
- Lubrique siempre después de la limpieza con un lubricante para instrumentos soluble en agua.
- Siga siempre el procedimiento de limpieza aprobado por la institución, siempre y cuando cumpla con lo especificado en el presente manual
- No utilice agentes de limpieza corrosivos. Recomendamos soluciones de limpieza y enjuagues con pH 7.0.
- No utilice limpiadores abrasivos ni cepillos con cerdas duras.
- Utilice siempre agua destilada únicamente para enjuagar. El agua con contenido de cloruro puede dañar o incluso destruir los instrumentos.
- No deje los instrumentos en soluciones de limpieza o desinfección por períodos prolongados (durante la noche o el fin de semana), los instrumentos pueden deteriorarse.
- Asegúrese siempre de que todos los instrumentos se utilicen únicamente para el propósito para el que fueron diseñados.
- Maneje siempre todos los instrumentos con cuidado. Nunca los fuerces demasiado, los deje caer o los use incorrectamente.
- Siempre revise todos los instrumentos en busca de daños después de su uso.
- Siempre preste especial atención a los instrumentos microquirúrgicos. Sus finas puntas pueden dañarse fácilmente al entrar en contacto con otros instrumentos o con los lados del estuche en el que deben guardarse.
- Asegúrese de que todos los instrumentos estén completamente secos antes de guardarlos.
- Empaque los instrumentos con cuidado y deje los más pesados sobre un trozo de tela o toalla en la parte inferior.
- Guarde y esterilice los instrumentos con mango de arco en un soporte especial. Deje siempre las rejillas y los trinquetes abiertos.
- Comprobar la dureza del agua utilizada en la autoclave. El agua demasiado dura dejará depósitos en los instrumentos.
- Si se utiliza un ablandador de agua, asegúrese de que esté al nivel recomendado por el fabricante de la autoclave. Demasiado puede causar decoloración o picaduras.

Esterilización	Los instrumentos se pueden esterilizar con el método de esterilización ETO (óxido de etileno) o vapor • Exposición ETO con mezcla de 20/80 con CO₂ por 6 horas, Temperatura 54 C, Vacío -0.50 a +0.60 kPa y humedad relativa 60-70%. • Esterilización a vapor 121 °C, 15-30 minutos • Esterilización a vapor 134 °C, 3-10 minutos
Desinfección	Se puede utilizar: • Alcohol isopropílico al 70 % y agua al 30 % para desinfectar los instrumentos.
Vida útil	Los instrumentos pueden tener una vida útil de 3 años, de acuerdo a la frecuencia de uso y cuidado que se tenga.
Disposición final	No se requiere disposición especial para los instrumentos quirúrgicos, excepto por el cuidado por riesgo biológico (contaminación después del uso), ya que no contienen ningún material tóxico o peligroso. Deben seguirse las regulaciones para disposición final de elementos metálicos.

Simbología	Significado
	No estéril
	Mantener fuera de la incidencia directa de la luz solar
	Mantener seco
	Marca CE

Importador por:

Impormedical Equipos y Suministros Médicos S.A.

Calle 5oeste # 4A-12, Cali, Colombia

Tel: 6022855088



Garana Industries Pvt. Ltd.
Christian Town, Sialkot 51310. Pakistan