



Modelo: GMD30-DC

Por elegir nuestro **fonendoscopio pediátrico GMD30-DCQ-KIDS**, diseñado especialmente para auscultación de niños. Lea cuidadosamente las instrucciones de uso descritas en el presente manual.

Descripción

El fonendoscopio consta de una pieza torácica, tubo, arco binaural y olivas (como se muestra en la fig. 1). Adicional, incluye 5 diseños de animales y un set de accesorios (un par de olivas, un anillo anti-frío y una membrana)

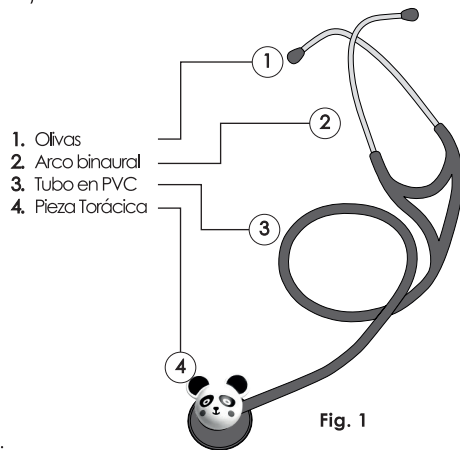


Fig. 1

1. Olivas
2. Arco binaural
3. Tubo en PVC
4. Pieza Torácica

Accesorios:



Olivas

Anillo anti-frío

Membrana

Diseños de animales

Uso:

1. Verifica que las olivas estén bien ajustas. Estas están diseñadas para adaptarse al conducto auditivo y bloquear el ruido ambiental.
2. Para ajustar el ángulo del arco binaural, sujeta el tubo con una mano y gira cada tubo para que el ángulo sea correcto. Ajusta el otro de la misma manera que se muestra en la Fig. 2.
3. Para reducir la tensión del resorte del arco binaural, agarra cada tubo en su curva y tira suavemente hacia afuera como se muestra en la Fig. 3.
4. Para aumentar la tensión del muelle, aprieta los tubos de los oídos juntos como se muestra en la Fig. 4.
5. Cuando las olivas están en tus oídos, los tubos deben estar orientados hacia adelante, como se muestra en la Fig. 5. Un uso incorrecto del estetoscopio puede resultar en un mal sellado acústico y, en algunos casos, en una obstrucción total del sonido.
6. Ubique la membrana de la pieza torácica sobre la zona a auscultar del paciente y presione levemente para asegurar un buen contacto con la piel como se indica en la Fig. 6.

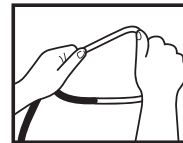


Fig. 2

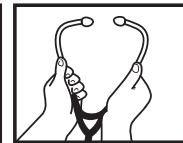


Fig. 3

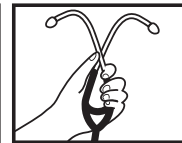


Fig. 4

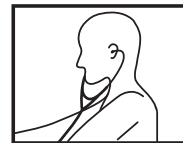


Fig. 5

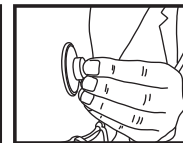


Fig. 6

Nota: Asegúrate de que las olivas estén ligeramente hacia delante, en dirección al conducto auditivo.

El fonendoscopio pediátrico cuenta con 5 diseños de animales que pueden intercambiarse. Para colocar uno diferente siga los pasos a continuación.


1. Retire a presión el muñeco que está ubicado en la pieza torácica. Sujételo de los costados y retírelo hacia arriba. Evite movimientos de torsión ya que puede fracturar la pieza.



2. Tome el diseño de animal a colocar y ubique los dos ganchos en los orificios de la pieza torácica.



3. Presione la pieza del diseño de animal hasta que quede se escuche un pequeño de ajuste. Evite hacer movimientos de torsión para prevenir cualquier fractura de la pieza.

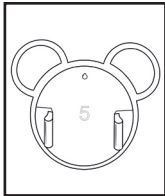

Limpieza:

Para evitar la acumulación de suciedad, guarda siempre el fonendoscopio en su empaque o un estuche. El exterior del instrumento puede limpiarse con un paño limpio ligeramente humedecido con agua sola o agua con un jabón neutro. Para la desinfección, el estetoscopio puede limpiarse con un paño limpio ligeramente humedecido con alcohol o desinfectante para superficies de dispositivos médicos.

Nota: Nunca haga aspersión directa de líquidos sobre el fonendoscopio. Asegúrese de que ningún líquido penetre el dispositivo. Dado que el estetoscopio no está diseñado para operaciones, basta con una simple limpieza y/o desinfección. No uses ningún agente abrasivo.

Especificaciones Técnicas

Largo total	74 cm
Diámetro de tubo	9 mm
Largo del tubo	53.5 cm
Peso neto	105 g
Diámetro de la campana	30 mm
Material de la pieza torácica	Zinc y ABS
Material del tubo	PVC
Material del marco binaural	Acero inoxidable
Material de las olivas	Silicona
Número de campanas	1

Garantía:

El fonendoscopio cuenta con una garantía limitada de un (1) año a partir de la fecha de compra por parte del usuario final. Esta garantía cubre defectos de fabricación, materiales y mano de obra, siempre que el dispositivo haya sido utilizado conforme a las instrucciones proporcionadas en este manual. Comuníquese con su distribuidor o con nuestro servicio al cliente.

La garantía cubre los siguientes aspectos:

- Defectos en la estructura del arco metálico.
- Fallas en el arco binaural y en el resorte resultantes de defectos de fabricación.
- Daños en el diafragma o campana atribuibles a materiales defectuosos.
- Fugas acústicas generadas por fallas de manufactura en las conexiones.

La garantía no cubre:

- Desgaste normal por uso, incluyendo olivas, anillo antifrío, accesorios (diseños de animales) y membranas.
- Daños por manipulación inadecuada, golpes, torsiones excesivas del tubo o uso indebido.
- Limpieza con solventes, alcoholes fuertes o productos abrasivos.
- Modificaciones no autorizadas o reparaciones realizadas por personal no certificado.
- Roturas o mal funcionamiento causados por exposición prolongada a calor extremo, humedad o agentes químicos.

Servicio al cliente

En caso de requerir información acerca del uso del producto o alguna reclamación referente a las PQRS, por favor contactarse a nuestras líneas de servicio al cliente **(602) 285 5088** ext 104 / **310 493 6998** o al correo electrónico **servicioalcliente@impormedical.com.co**.

 HONSUN NANTONG CO., LTD
NO. 8 TONGXING ROAD, ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA,
226009 NANTONG CITY, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA.

Importado por: IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MÉDICOS S.A.
CALLE 5 OESTE No. 4A-12, CALLI, VALLE.