


SEMP I

Superficie Especial para
el Manejo de la Presión

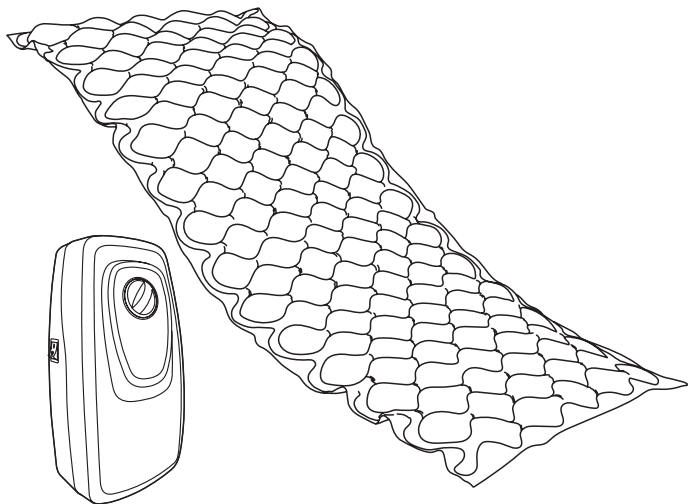

Manual de Usuario

KP
KONFORT PLUS

Indicaciones de seguridad

- ⚠ Tenga cuidado al operar este equipo
- ⚠ No deje conectado al tomacorriente cuando no esté en uso
- ⚠ No exponga el equipo a condiciones de humedad excesiva
- ⚠ No use productos de limpieza corrosivos como desengrasantes industriales
- ⚠ No intente reubicar este dispositivo mientras esté conectado al tomacorriente

Principios de operación

Alternar la presión a un ritmo suficiente evita la compresión vascular prolongada causante de la falta de oxígeno en los tejidos. La presión alternante permite adaptar la superficie a la posición del paciente.


Principios de operación

Este producto está recomendado para:


- Minimizar el riesgo de desarrollar úlceras por presión
- Pacientes que pasen más de 15 horas al día en cama.
- Pacientes que tengan un riesgo de medio a alto de desarrollar una úlcera por presión.

Instalación / Uso


1. Desdoble la superficie especial para el manejo de la presión y ubíquela en la cama

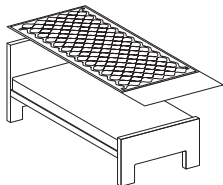


2. Ubique el extremo inferior de la superficie debajo del colchón

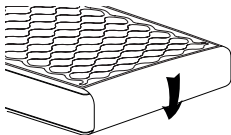


3. Ubique el compresor en el piecero de la cama

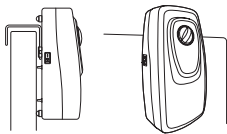


4. Conecte los tubos de aire de la superficie al compresor

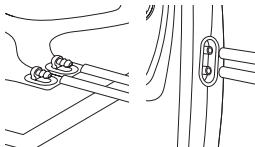


5. Conecte el cable de alimentación del compresor a un tomacorriente funcional

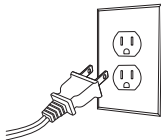


6. Presione el botón de encendido / apagado

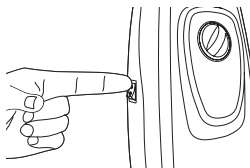

7. Coloque el compresor en el nivel máximo

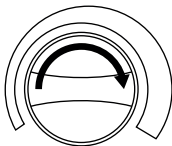

8. Espere que la superficie se llene completamente antes de ubicar al paciente

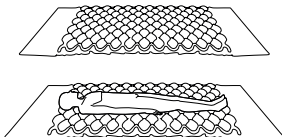

9. Regule la presión del compresor de acuerdo a la morfología del paciente



Limpieza / Desinfección

- ⚠ Antes de realizar la limpieza, verifique que no se encuentre conectado al toma corriente.
- ⚠ Limpie con un paño húmedo y un detergente suave para mantener el producto libre de polvo. No conecte el compresor al tomacorriente si se encuentra húmedo.

Mantenimiento

El mantenimiento del equipo solo puede realizarlo personal autorizado por **Konfort Plus**.

Especificaciones Técnicas

SUPERFICIE	
Máxima capacidad de peso:	130 Kg
Dimensiones:	200 x 90 cm
Material:	PVC (0,3 mm)
COMPRESOR	
Tiempo del ciclo:	12 min
Salida de aire:	5-7 lpm
Rango de presión:	[50 - 110] mmHg
Protección contra riesgo eléctrico:	Clase II
Alimentación:	110 – 120 V, 60 Hz

Política de garantía

Konfort Plus garantiza que el producto **SEMP I** cumple con las especificaciones descritas en el manual, y está libre de defectos en los materiales y en la fabricación durante un (1) año a partir de la fecha de compra del primer usuario. Si se realiza el registro del producto en la página web **www.konfortplus.com.co** quince (15) días después de la fecha de factura, obtendrá un (1) año de garantía adicional.

Esta garantía no cubre los daños causados por:

1. Uso o mantenimiento del producto distinto a lo especificado en el manual de usuario.
2. Modificación o reparación del dispositivo por parte de personal no autorizado por **Konfort Plus**.
3. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a humedad, mojado por algún líquido o sustancia corrosiva, así como por cualquier otra falla que se atribuya al usuario.
4. No están cubiertos por la garantía: superficie, mangueras, cable de alimentación o cualquier otra parte que puedan sufrir desgaste por uso regular.

Nota: Si se determina que algún producto o accesorio cubierto por esta garantía es defectuoso debido al uso de materiales, componentes o fabricación, y se reclama la garantía dentro del período establecido, **Konfort Plus** reparará o reemplazará, a su criterio, el producto o accesorio defectuoso sin costo alguno.

Para solicitar servicio técnico o garantía por parte de **Konfort Plus**, contáctese con servicio al cliente, quien le brindará asesoría y un número de notificación para darle solución a su petición.

Servicio al cliente

En caso de requerir información acerca del uso del producto o alguna reclamación referente a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS), por favor contáctese a nuestras líneas de servicio al cliente: **(2) 285 5088 ext. 104 / 310 493 6998** o al correo electrónico **servicioalcliente@impormedical.com.co**

Registro Sanitario: INVIMA 2020DM-00021608



Foshan HongFeng Co.,Ltd.

Dirección: No.4-2 Leqiang Road, Leping Sanshui, Foshan, 528100, Guangdong, China

SEMP I

Superficie Especial para
el Manejo de la Presión

www.konfortplus.com.co

