

- ⚠

Lea las instrucciones a fondo antes de usar el termómetro digital.
- ⚠

Peligro de asfixia: Si se traga la tapa del termómetro y la batería puede ser fatal. No permita el uso de este dispositivo a un menor sin supervisión de los padres.
- ⚠

No use el termómetro en el oído. Está diseñado solamente para lecturas en uso oral, rectal y axilar.
- ⚠

Nota: El uso del protector de la sonda puede dar una discrepancia de 0.2 °F (0.1 °C) de la temperatura actual
- ⚠

Remueva la batería del dispositivo cuando no esté operando por largo tiempo.
- ⚠

El uso de lecturas de temperatura para auto diagnosticarse es peligroso. Consulte a su médico para la interpretación de los resultados. Auto diagnosticarse puede conducir a un empeoramiento de la condición de la enfermedad existente.
- ⚠

No intente mediciones cuando el termómetro esta mojado ya que puede resultar una lectura imprecisa.
- ⚠

No muerda el termómetro. Haciendo esto puede ocasionar una ruptura y/o lesión.
- ⚠

No intente desensamblar o reparar el termómetro. Haciendo esto puede ocasionar lecturas imprecisas.
- ⚠

Después de cada uso, desinfecte el termómetro especialmente en caso que el dispositivo sea usada por más de una persona.
- ⚠

No fuerce el termómetro dentro del recto. Detenga la inserción y aborte la medición cuando el dolor esté presente. El no hacerlo puede ocasionar lesiones.
- ⚠

No use el termómetro oralmente después de ser utilizado rectalmente.
- ⚠

Para niños que tienen dos años o menos, por favor no use el dispositivo oralmente.

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR


El termómetro digital provee una rápida lectura con alta exactitud de la temperatura del cuerpo del individuo. Para un mejor entendimiento de sus funciones y proveer resultados confiables, por favor lea todas las instrucciones primero.

Este termómetro es fabricado de acuerdo al sistema de ASTM E1112-00 (Re-aprobación 2011). ISO 80601-2-56, IEC 60601-1-11, IEC 60601-1-2(EMC), AAMI/ANSI ES60601-1(Safety) standards. Fabricante es certificado en ISO 13485

CONTENIDO

1 Termómetro, 1 Manual de usuario, 1 Caja de almacenamiento.

ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO

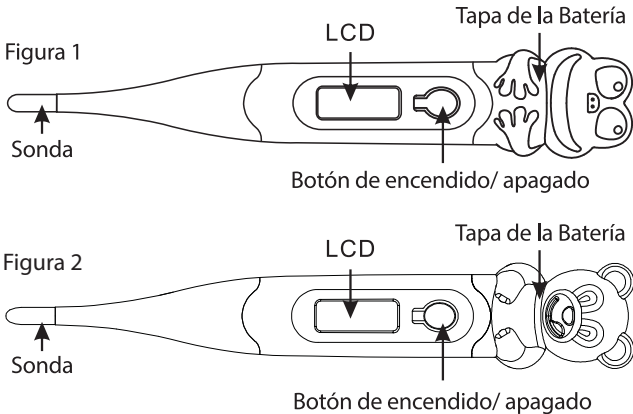

PRECAUCIÓN

- ⚠

- * No doble o deje caer el termómetro. Este no es a prueba de choques.
 - * No hervir la sonda para desinfectar.
 - * No almacene directamente a la luz solar o en áreas de calor extrema.
 - * Las comunicaciones RF portables y móviles como hornos microondas y celulares, generan fuertes campos eléctricos o electromagnéticos, lo que puede producir fuertes interferencias cuando están cerca al dispositivo.

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

	Corriente Directa		Código de Lote
	Tipo BF		Fabricante
	Precaución, consulte documentos de acompañamiento		

ESPECIFICACIONES

Tipo	Termómetro digital (No predictivo)
Rango	32 °C – 42.9 °C (90 °F – 109.9 °F)
Exactitud	± 0.1 °C, 35.5 °C – 42.0 °C (±0.2 °F, 95.9 °F – 107.6 °F) ± 0.2 °C bajo 35.5 °C o encima de 42.0 °C (±0.4 °F bajo 95.9 °F o debajo de 107.6 °F) A temperatura ambiente de 18 °C a 28 °C (64.4 °F a 82.4 °F)
Display	Display de cristal líquido, 3 ½ dígitos
Memoria	Para almacenar el último valor medido
Batería	Una de 1.5 V DC. Botón de batería (tamaño LR 41 o SR41, UCC 392)
Tiempo de Vida de la Batería	Aproximadamente 200 horas
Dimensiones	13.8 cm x 2.2 cm x 1.2 cm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	Aproximadamente 16 g incluida la batería
Condiciones Ambientales de Uso	Temperatura: 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F) Humedad Relativa: 15 % - 95 % RH
Condiciones de Almacenamiento y Transporte	Temperatura: -20 °C – 55 °C (-4 °F – 131 °F) Humedad Relativa: 15 % - 95 % RH
Clasificación de protección de ingreso	IP 27
Clasificación	Tipo BF

°F / °C CONMUTABLE

Las lecturas de la temperatura están disponibles en grados Fahrenheit o Celsius (° F/ °C; localizado en la esquina superior derecha del LCD). Presione y Mantenga el botón encendido/apagado por aproximadamente 4 segundos para el cambio de la configuración actual.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1

Presione el botón de encendido/apagado cercano al display de LCD. Se escuchará un sonido y se muestra en la pantalla el último registro grabado de temperatura. Después de mostrar la autocomprobación, el termómetro está en el modo de prueba
- *

Nota: Si la medida de la temperatura es menor de 32 °C o 90 °F, el LCD mostrará Lo, si la medida de la temperatura es más alta de 42.9 °C o 109.9 °F, el LCD mostrará Hi.
- 2

Posición del termómetro en la localización deseada (boca, recto, o axila)

a)

Uso Oral: Ubique el termómetro bajo la lengua como es indicado por “√” en la posición mostrada en la figura 2. Cierre su boca y respire de manera uniforme a través de la nariz para evitar que la medición se vea influenciada por inhalar/ exhalar aire. La temperatura normal esta entre 35.7 °C y 37.3 °C (96.3 °F y 99 °F)

b)

Uso Rectal: Lubrique la punta de la sonda de plata con vaselina para una fácil inserción. Suavemente inserte el sensor aproximadamente 1 cm (menos de ½”) en el recto. La temperatura normal esta entre 36.2 °C y 37.7 °C (97.2 °F y 99.9°F).

c)

Uso Axilar: Limpie la axila seca. Ubique la sonda en la axila y mantenga el brazo presionado firmemente al lado. Para un punto de vista médico, este método proporcionará siempre lecturas imprecisas, y no debería ser usado si la medición requiere ser precisa. La temperatura normal esta entre 35.2 °C y 36.7 °C (95.5 °F – 98.1 °F).

Figura 2

3.

El signo de grado parpadea durante todo el proceso de la medida. Cuando el parpadeo se detiene una alarma sonará por aproximadamente 10 segundos. La medida leída aparecerá en el LCD simultáneamente. El tiempo mínimo de medida hasta el tono de señalización debe ser mantenido sin excepción. La medición continúa incluso después de la notificación del zumbador. La temperatura mostrada no cambiará cuando el termómetro es removido de la posición de prueba.

*

Nota: Normalmente los zumbadores hacen “Bi-Bi-Bi-Bi”; la alarma suena más cuando la temperatura alcanza 37.8 °C (100 °F) o más, y los zumbadores hacen “Bi-Bi-Bi—Bi-Bi-Bi”.

4.

Para prolongar la vida de la batería, presione el botón de encendido/apagado para apagarlo después que la prueba este completa. En caso contrario, la unidad se apagará de manera automática después de alrededor de 10 minutos.

5.

Almacene el termómetro en su caja de protección.
- REEMPLAZO DE LA BATERÍA
1.

Reemplace la batería cuando “” aparece en la esquina inferior derecha del display LCD.

2.

Hale la cubierta de la batería hacia afuera como es mostrada en la Figura 3.

3.

Suavemente hale el circuito de plástico con el compartimento de la batería aproximadamente 1 cm, ver figura 4.

4.

Use un objeto punteado como un lapicero para remover la batería vieja. Deseche la batería legalmente. Reemplace con una batería nueva de 1.5 V DC tipo botón LR41 o SR41, UCC392, o equivalente. Este seguro que la batería este instalada con la polaridad “+” de frente, ver figura 5.

5.

Deslice el compartimento de la batería en su lugar y colocar la cubierta.
- Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 3

Figura 4

Figura 5
- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
- Limpie el termómetro con un paño limpio y suave.

-

Para las manchas difíciles, limpie el termómetro con un paño humedecido con agua o una solución con un detergente neutral y luego exprimir a fondo. Termine la limpieza con un paño suave seco.
- Observe las siguientes instrucciones para prevenir daño al termómetro:
- No use benceno, tiner, gasolina u otro solvente fuerte para limpiar el termómetro.

-

No moje la sección de detección con alcohol durante largos períodos de tiempo o intente esterilizarlo utilizando agua caliente (agua a una temperatura de 50 °C (122 °F) o superior.

-

No use lavado ultrasónico para limpiar el termómetro.
- GARANTÍA LIMITADA
- El termómetro tiene un año de garantía a partir de la fecha de compra. Si el termómetro no hace la función propiamente por un defecto de fábrica, nosotros asumiremos su reparación o reposición. A excepción de la batería, todos los componentes son cubiertos. La garantía no cubre daños al termómetro por uso inapropiado. Para obtener garantía en el servicio, se requiere la factura original de la compra.
-
- La eliminación de este producto y las pilas usadas deben llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones nacionales sobre la disposición de productos electrónicos.
-
- Fabricante: Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments co.,Ltd
Dirección Fabricante: Building 2, No.202, Zhenzhong Road, West Lake Economy & Technology Zone, Hangzhou, China
- NÚMERO RS INVIMA: 2016DM-0015276
NOMBRE RS INVIMA: Termómetros digitales partes, accesorios y repuestos.
- Importado y Distribuido por
Impomedical Equipos y Suministros Médicos S.A
AV 9AN # 7N-111, CALI, VALLE, Colombia
Teléfono: + 57 (602) 285 5088
- TERMÓMETRO DIGITAL
PEDIÁTRICO **GMD®**