



**CÓMODO SANITARIO
PLEGABLE CON RUEDAS
ALUMINIO PINTADO**
KB225CR-AL19



Konfort Plus

Agradecemos su preferencia de los productos Konfort Plus. Deseamos conocer sus comentarios, preguntas y opinión sobre la calidad de servicio que ha recibido de su distribuidor autorizado.

Para Contestar sus Inquietudes

Su distribuidor autorizado puede brindarle una asesoría y responder todas sus inquietudes acerca de la seguridad, uso y mantenimiento. Para referencia futura, complete la siguiente información:

Distribuidor:

Dirección:

Teléfono:

No. Serie:

Fecha de Compra:

Este manual provee instrucciones importantes respecto a la seguridad y mantenimiento del producto. Asegúrese de leerlo cuidadosamente antes de usarlo, y consúltelo cuantas veces sea necesario para garantizar el uso apropiado y seguro.

Para servicio y reparaciones, recuerde que su distribuidor autorizado de KP le puede ofrecer la ayuda que necesite.

Conserve este manual en un lugar seguro para una consulta futura.

**Instrucciones de instalación para
el cómodo KB225CR-AL19**



Antes de iniciar verifique que todas las partes estén completas:

Estructura

Balde

Asiento


Espaldar

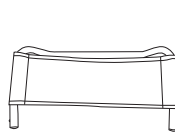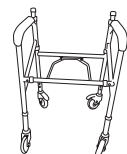

ARMAR LA ESTRUCTURA:


Despliegue los laterales del cómodo de tal manera que los puntos de sujeción de la barra soporte del asiento queden hacia el interior.

1. Suba la barra soporte del asiento
2. Introduzca uno a uno cada extremo en los puntos de sujeción
3. Asegúrese que el pin de seguridad quede bien ubicado

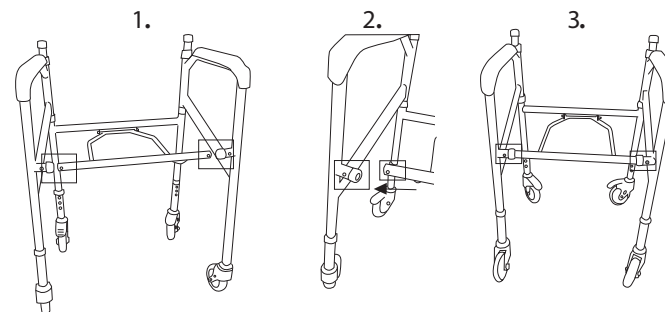


INSTALAR EL ESPALDAR:

1. Introduzca ambos extremos del espaldar en los orificios superiores del cómodo sanitario.
2. Presione los pines de seguridad y presione hacia abajo en ambos extremos hasta asegurar el pin de seguridad en su sitio

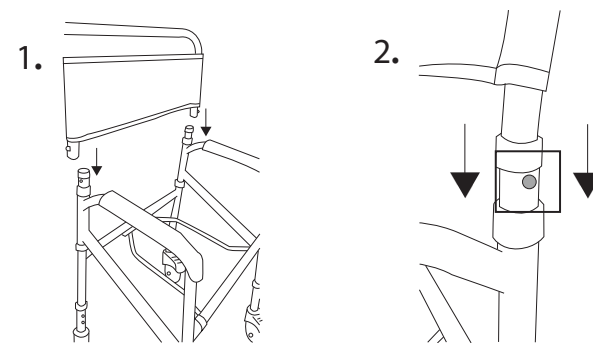


INSTALAR EL ASIENTO:

1. Ubique el asiento de tal manera que los ganchos de la parte trasera se superpongan a la barra lateral trasera del cómodo sanitario.
2. Presionar hacia abajo hasta que cada uno de los dos ganchos quede sujeto a la estructura.
3. Verifique que el asiento se inclina sin atascamientos.

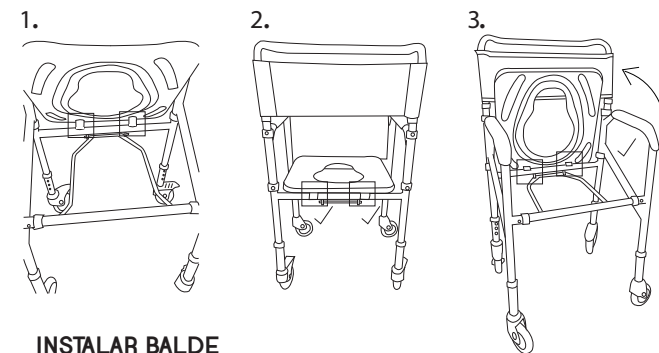

INSTALAR BALDE


- A. Levantar el asiento e introducir el balde por encima de la parrilla verificando que esté bien sujeto o
- B. Sin levantar el asiento, introducirlo desde la parte anterior del cómodo sanitario y deslizarlo por la parrilla.

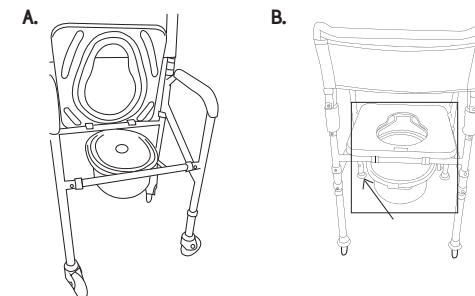

GRADUACIÓN DE ALTURA

El cómodo sanitario cuenta con dos puntos de graduación para la altura entre el asiento y el piso.

Para ajustar la altura, presione uno a uno los pines de seguridad y asegúrelos en la orificio de la altura deseada. Repita el procedimiento en cada una de las tres patas restantes, asegurándose que cada uno de los pines de seguridad está asegurados en el mismo punto de altura. No asegurar cada una de las patas en el mismo punto de altura genera inestabilidad en el dispositivo, lo cual podría causar un evento adverso al usuario. Antes de usar el cómodo sanitario verifique que cada una de las patas está al mismo nivel y cada una de ellas está en contacto con el piso.

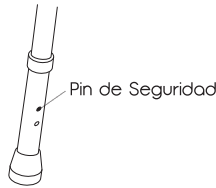

USO Y PRECAUCIONES

- Antes de usar el cómodo sanitario, verifique que todos los pines de seguridad mencionados en el proceso de armado estén correctamente asegurados
- Verifique que todas las ruedas están en contacto con el piso, si evidencia una rueda que no esté en contacto, cerciórese de que el pin de ajuste de altura está en el mismo punto que los demás. Si al hacer la corrección el problema persiste, evite el uso del cómodo sanitario.
- El cómodo sanitario cuenta con freno en dos de sus ruedas, al momento de usarlo, debe verificarse que el freno esté accionado para disminuir el riesgo de eventos con el uso del dispositivo.
- El cómodo sanitario en principio no está diseñado como silla para ducha. En caso de realizar la ducha de un usuario sobre el cómodo sanitario, se recomienda secar completamente el mismo, retirar las patas completamente y dejarlas a la inversa para que el agua no se acumule alrededor del tornillo que une la rueda con la pata.
- Si el uso del cómodo sanitario como silla para ducha es recurrente, se deben realizar inspecciones y mantenimientos preventivos con mayor frecuencia, enfocándose en revisar las ruedas, ajuste y estado del tornillo de unión de la rueda a la pata, remaches y pines de seguridad.
- El cómodo sanitario puede usarse sobre un sanitario si el tamaño del sanitario permite ingresar el cómodo sanitario. En tal caso, asegúrese de retirar el balde.
- El cómodo sanitario debe ser almacenado en interiores, en espacios frescos y sin incidencia directa del sol.

Precauciones:

- Las ruedas se incluyen en el cómodo sanitario para facilitar la movilidad del mismo sin requerir levantarlo del suelo para transportarlo.
- Las ruedas del cómodo sanitario no convierten este dispositivo en una silla de transporte, por lo cual solo está recomendado el traslado del usuario en trayectos cortos (p.e. cama-baño-cama o sala-baño-sala). Tenga en cuenta que en estos trayectos, el usuario deberá ir con los pies suspendidos en el aire para disminuir el riesgo de caídas.
- Evite usar el cómodo sanitario como silla de descanso, el usuario solo debe permanecer en el dispositivo mientras realiza las actividades para las cuales está diseñado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Realice la limpieza del balde posterior cada uso del dispositivo
- Para realizar la limpieza del cómodo sanitario puede usar un jabón neutro diluido (evite el uso de elementos e insumos abrasivos y corrosivos). Evite verter líquido directamente al dispositivo ya que puede ingresar agua al interior y deteriorar el material, use un paño ligeramente humedecido con la dilución de jabón y repase las superficies del dispositivo. Con un nuevo paño seco, remueva los restos de la dilución.
- Verifique periódicamente el cómodo sanitario, antes de cada uso haga un chequeo de los pines de seguridad y el ajuste de las ruedas, si evidencia un desajuste, asegúrese de ajustar nuevamente antes de hacer uso del dispositivo.
- Verifique periódicamente el estado de los frenos de las ruedas, si al accionar el freno nota que la rueda sigue girando, evite el uso del dispositivo y reemplace la rueda.
- Se recomienda por lo menos cada 6 meses hacer una revisión general en la que se tengan en cuenta los siguientes puntos:

- o Estado de los frenos de las ruedas
- o Ajuste de las ruedas a las patas
- o Lubricación de los rodamientos de las ruedas
- o Estado de los pines de seguridad
- o Verificación de rastros de humedad y aparición de óxido
- o Estado del asiento
- o Estado del espaldar
- o Estado de los remaches
- o Asegúrese que los pines de seguridad de ajuste en altura salgan completamente por los orificios respectivos para cada extensión de la base. Esto asegurará que las extensiones de las bases estén bloquea dos de manera segura en sus posición y que tenga una altura uniforme.
- o Asegúrese que TODOS los tornillos estén ajustados.
- o Verifique que los tapones de plástico o ruedas de las extensiones de las bases no estén rotos, desgastados o ausentes.

- Reemplace inmediatamente cualquier tapón, o rueda, o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
- o Todos los cuatro tapones o ruedas de las bases DEBEN tocar el piso simultáneamente en todo momento.
- o NO se pare sobre el cómodo.
- o Este cómodo NO debe ser usado como silla para ducha

NOTA: Si el cómodo sanitario ha llegado a ser usado como silla para ducha, se recomienda reducir el tiempo entre mantenimientos a por lo menos cada 3 meses.


Especificaciones Técnicas

Referencia	KB225CR-AL19
Profundidad	43 CM
Peso Neto	5,1 Kg
Capacidad de Peso	100 Kg
Ancho del Asiento	43 CM
Material	Aluminio
Tipo de Estructura	Plegable
Tipo de Apoyo	Ruedas de 4"
Altura del asiento al piso	48,5 - 51 Cm
Altura total	93 - 95,5 Cm
Altura respaldo	39 CM
Altura de apoyabrazos	24 CM

Garantía

Los cómodos sanitarios Konfort Plus cuentan con un [1] año de garantía en la estructura central por defectos de fabricación.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario, exceso de la capacidad de peso o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de tapa ara, balde, ruedas y apoyabrazos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

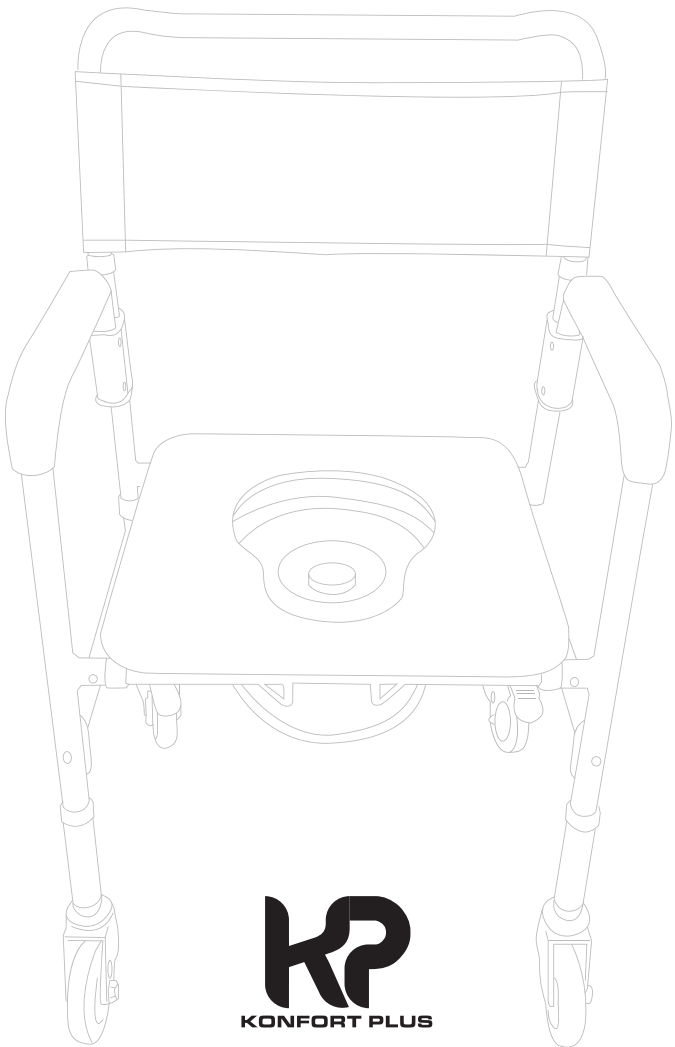

Fabricante: Double Care Medical Technology Co., Ltd.
Dirección del Fabricante: Second Street On The East Side Of Yongshi Avenue South Section (Liboshui Village Section) Shiwan Town Boluo Country Huizhou City Guangdong Province China

Importado por: Impormedical Equipos y Suministros Médicos S.A.
Dirección del Importador: AV 9AN # 7N-111, CALL VALLE
Teléfono: +57 (602) 285 5088

